

REF G124-121

Svenska

VERKSAMHETSPRINCIP OCH ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL

On Call[®] Advanced glukoskontrolllösningen innehåller en känd mängd av glukos. Genom att utföra ett kontrolltest får du veta att On Call[®] Advanced glukosmätaren och On Call[®] Advanced testremsorna fungerar korrekt och erhåller därigenom tillförlitliga resultat. Det är viktigt att utföra kontrolltest regel. Du bör utföra ett kontrolltest i följande fall:

- Innan du börjar använda mätaren första gången.
- När du vill kontrollera mätaren och testremsorna innan mätningen eller du vill kontrollera om du utför testningen på rätt sätt.
- När du öppnar en ny förpackning testremsor.
- När testresultatet inte överensstämmer med hur du mår.
- Om mätaren inte funkar på rätt sätt eller du har tappat mätaren t.ex. på golvet.
- När du har rengjort mätaren.
- Minst en gång i veckan.

On Call[®] Advanced Starter Kit innehåller bara kontrollösning 1, som normalt räcker till att utföra kvalitetskontrolltestet. Om du inte är säker fungerar testremsorna och mätaren som de ska, kan du utföra kontrolltestet också med kontrollösning 2.

KONSISTENS

Kontrollösning 1 innehåller mindre än 0.2% glukos (aktiv ingrediens) och Kontrollösning 2 innehåller mindre än 0.4% glukos (aktiv ingrediens) med konserveringsmedel och vatten.

HUR FÖRVARAS OCH ANVÄNDAS GLUKOSKONTROLL LÖSNINGEN

- Förvara kontrolllösningen i rumtemperatur vid 2-30°C. Frys den inte.
- Omskaka flaskan noggrant före användning. Förslut flaskan ordentligt efter användning.
- Kontrolltestet är pålitligt om testet utförs i 10-40°C.
- Öppnad flaskan av kontrolllösningen håller i 6 månader, unöppnad dock längst till det utgångsdatum som redan finns angivet på flaskans etikett. Obs! Utgångsdatumet visas t.ex. 2012-01 (= januari, 2012).
- Skriv ned vilket datum du öppnade flaskan på etikett. Använd inte kontrollösning som har passerat utgångsdatum.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

- Kontrolllösningen är avsedd för användning utanför kroppen (*in vitro*). Inte svälj eller injicerat!
- Omskaka flaskan noggrant.
- Använd kontrollösning i temperatur 10 -40°C.
- På testremseförpackning visas intervall (mmol/l) för kontrollösningarna, vilka är inte dina mål nivåerna. Diskutera med din diabetessköterska vilket är ditt mål nivå.
- Kasta inte testremsan i kontrollösningflaska. Kontrollösningen kan kontamineras.
- Använd endast On Call[®] Advanced glukoskontrollösning med On Call[®] Advanced mätaren och med On Call[®] Advanced testremsorna.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

- Kontrolllösningen
- Förpackningsappendix/Bruksanvisning

TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER INTE I FÖRPACKNING

- Blodglukosmätare
- Testremsor

BRUKSANVISNING

1. Sätt i en ny testremsas grå kontaktände i mätaren. Mätaren slås på automatiskt och ljuder en gång om du har aktiverat ljudsignalen. Se på mätarens bruksanvisning mera information om kvalitetskontrolltest.
2. Omskaka kontrollösning flaska noggrant.
3. Kläm ut försiktigt och kasta bort en liten droppe ur flaskan. Om flaskspetsen ska blockera, slå spetsen försiktigt mot en hård och ren plan och skaka igen.
4. Kläm ut en andra droppe ut flaskan mot en ren plan som inte absorberar. Röra med testremses blåa ände den kontrollösningdroppen. Om ljudsignalen i mätaren är aktiverat, mätaren ljuder en gång när tillräckligt med lösning finns det på testremsan.
Obs! Applicera inte kontrollösningen direkt från flaskan.
Om det inte finns tillräckligt med kontrollösning på testremsan, applicera inte mera. Kassera den använda testremsan och upprepa testen med en ny testremsa.
5. Läs resultatet på displayen.

ACCEPTABELT RESULTAT



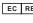

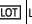




Det erhållna resultatet ska ligga inom respektive intervall. Intervallt står angivet på testremsburkens/foliopåsens etikett. Se till att jämföra resultatet med rätt kontrollnivå (kontrollösning 1 med CTRL 1 och kontrollösning 2 med CTRL 2). Om kontrollresultatet ligger inom det intervall som anges på testremseburken fungerar testremsorna och blodglukos mätaren som de ska eller du har inte utfört testen enligt bruksanvisning.

Om kontrollösnings resultat ligger inte inom godkänt intervall:

- Kontrollera utgångsdatumet för testremsorna och kontrolllösningen. Använd inte testremsorna efter det datumet. På varje testremse förpackningens etikett visas utgångsdatumet (📅). Använd inte testremsorna som har varit i öppen förpackningen över 6 månader. Kassera alla testremsorna och kontrollösningarna som har passerat utgångsdatum.
- Kontrolltestet är pålitligt om testet utförs i 10-40°C.
- Se till att testremseburken och flaskan med kontrollösning alltid är väl förslutna.
- Kontrollera att kodnumret på displayen stämmer med kodnumret på testremseburken/påsen.
- Använd endast On Call[®] Advanced glukoskontrollösning.
- Kontrollera att du utförde testningen på rätt sätt enligt bruksanvisning.

Om du fortfarande inte har hittat felorsaken, upprepa kontrolltestet med en ny testremsa eller kontakta importören. Om kontrollresultaten inte ligger inom det godkända intervallt, använda inte mätaren. Kontakta importören.

FÖRKLARING AV ANVÄNDA SYMBOLER

	Bekanta dig med bruksanvisning		Utgångsdatum		Fullmäktigt representant i EC region
	<i>In vitro</i> diagnostik (av- sedd för användning utanför kroppen). Får inte förtäras.		Lot nummer		Kontroll intervall/gränsvärden
	Temperatur begränsning- år. Förvara i 2-30°C.		Tillverkare		Produktnummer



Importör: Ekoweb Oy/ACON Laboratories
Pharmacy, Itäinen Pitkääkatu 4 B, 20520 Turku
p. 050 56 45670, faksi 02 6518 2549
sähköposti: info@ekoweb.fi, www.ekoweb.fi, www.aconlabs.fi

Nummer: 115050260
Giller fr.o.m: 2009-xx-xx

刪除の内容: 1

刪除の内容: -09-11